


StatLock[®] Arterial

Stabilization Devices.

動脈カテーテル専用固定具

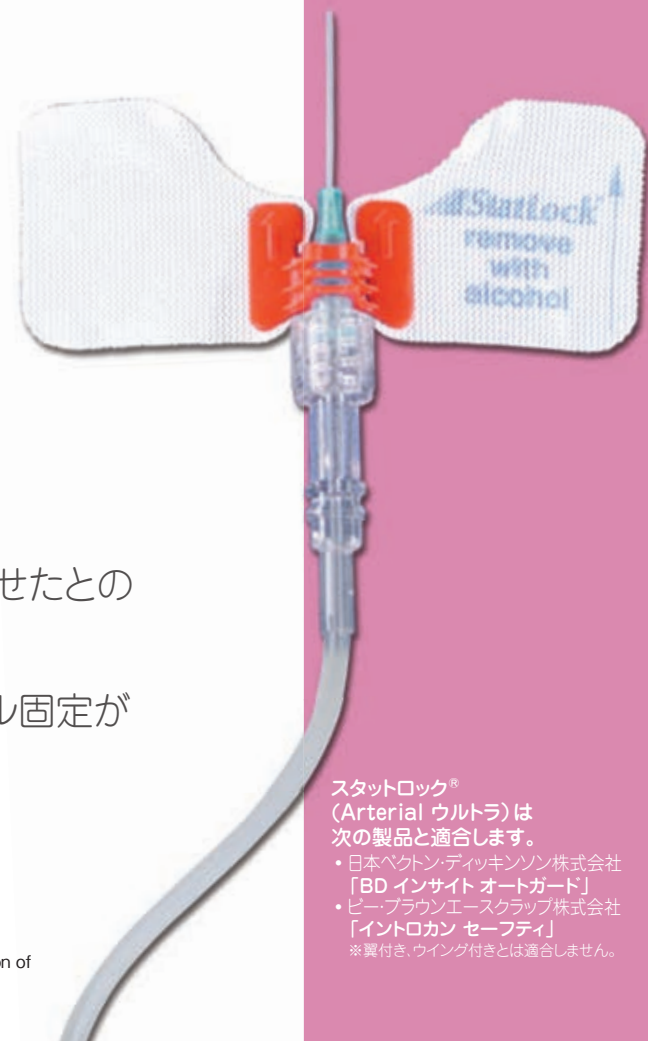

- カテーテルの予定外の再挿入を49%減少させたとの報告があります¹⁾
- テープ固定よりもしっかりと容易にカテーテル固定が行えます

スタットロック[®]
(Arterial ウルトラ)は
次の製品と適合します。

- ・日本ベクトンディッキンソン株式会社
「BD インサイト オートガード」
- ・ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
「イントロカン セーフティ」

※翼付き、ウイング付きとは適合しません。

動脈カテーテル専用固定具 スタットロック® (Arterial ウルトラ) の使用方法




●適合製品をお確かめの上、ご使用ください。

貼り付け手順



1

1 院内のプロトコール及び手順に従って、アルコール綿等によりカテーテルの皮膚刺入部及び固定部位を清拭します。

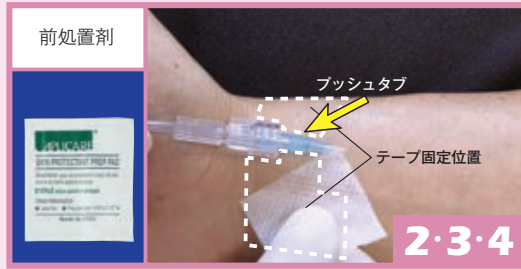

2・3・4

2 カテーテルを挿入後、延長チューブを接続します。
3 カテーテルのハブにあるプッシュタブを上向きにし、必要に応じて滅菌テープにて仮留めします。
4 付属の前処置剤を貼付部位の皮膚に広めに塗布します。塗布後、完全に乾燥させます。(通常10~15秒間)

* 前処置剤の使用により皮膚をつくることで皮膚を保護します。



5

5 パッドに印字された矢印が皮膚刺入部に向くようにして、本品をカテーテルのハブの上部に位置させます。



6

6 カテーテルのハブに本品のリテイナーをはめ込んで固定します。

* プッシュタブをリテイナーの溝にはめ込むように固定します。



7

7 パッドの裏紙を片側ずつ、ゆっくりと剥がして皮膚に貼り付けます。

* カテーテルのハブにリテイナーを取り付けるまでは、パッドの裏紙を剥がして皮膚に貼り付けないでください。




8・9

8 刺入部を中心に透明ドレッシング材等を貼り付けて保護します。

9 必要に応じて付属の滅菌テープにて固定します。

取り外し手順

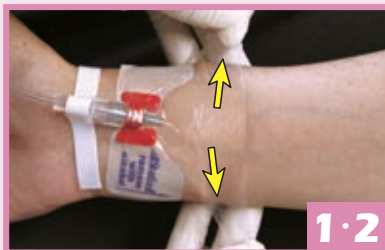

1・2

1 透明ドレッシング材等を注意深く剥がします。

2 必要に応じてテープで仮留めしておきます。



3

3 アルコール綿等でパッドの端を浸潤させて持ち上げ、その後さらに粘着面を浸潤させながらゆっくり剥がしていきます。



4・5

4 まずパッドの片側を剥がした後、カテーテルにはめ込まれたリテイナーを注意深く取り外します。

5 さらにアルコール綿等で浸潤させながらもう片方のパッドを剥がします。

ご使用にあたっての注意

スタットロックの使用中は、固定状態を毎日観察し、パッドの剥がれ、破損、汚損等の異常が認められる場合、あるいは医師、看護師等の医療従事者が必要と判断する場合には本品を新しいものに交換してください。また、少なくとも7日毎に本品を新しいものに交換してください。

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※Bard、パード、StatLock、スタットロックは、C. R. Bard社の登録商標です。

販売名：スタットロック
届出番号：27B1X00052000007
クラス分類：[1]一般医療機器
一般的名称：カテーテル固定用パッチ

スタットロック (Arterial ウルトラ) のセット内容



スタットロック® (Arterial ウルトラ) は次の製品と適合します。

- ・「BD インサイト オートガード」日本ベクトン・ディッキンソン株式会社(翼付きを除く)
- ・「イントロカン セーフティ」ビー・ブラウンエースクラップ株式会社(ウイング付きを除く)

カタログ番号	仕様	包装単位
ART0422	Arterial ウルトラ	50入



製造販売業者



株式会社 メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06 (6203) 6541(代)
(平野町センチュリービル9F)

http://www.medicon.co.jp