


StatLock[®] Dialysis

Stabilization Devices.

バスキュラーアクセスカテーテル専用固定器具

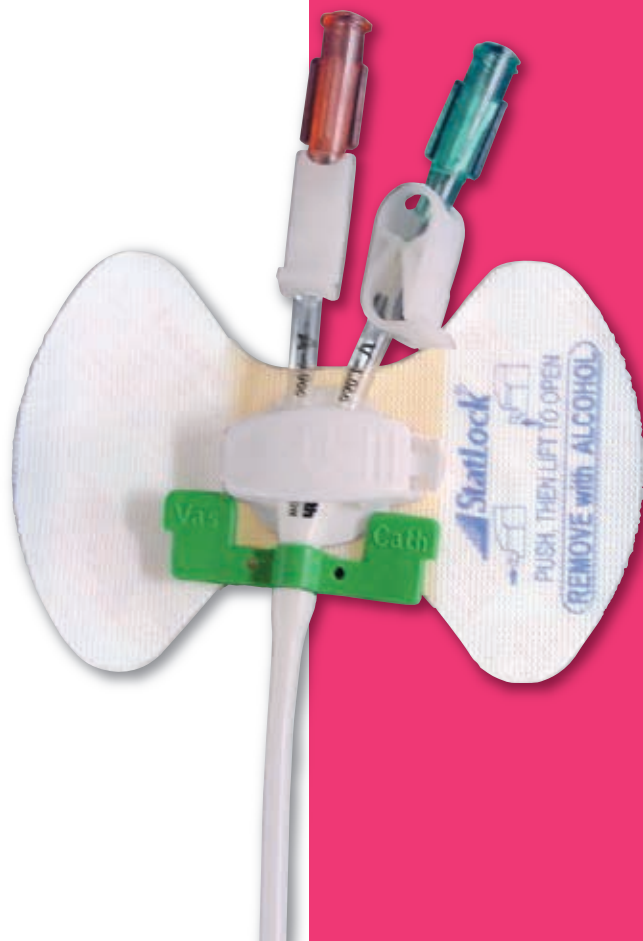

■スーチャーフリー Securement Device


- 縫合による感染リスクを低減します
- 針刺しを予防します




販売名: スタットロック

カタログ番号	仕様	包装単位
DIO120CE	Dialysis	25入

届出番号: 27B1X00052000007

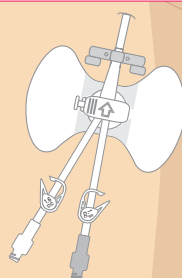


〔使用イメージ図: 大腿静脈〕

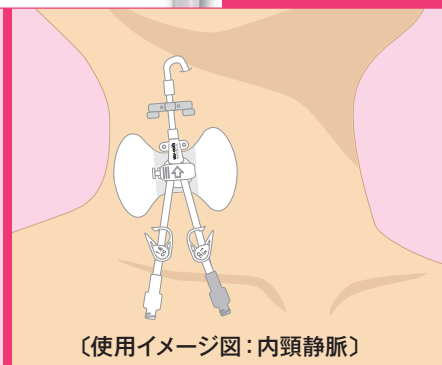


〔使用イメージ図: 内頸静脈〕


貼り付け手順 (大腿静脈挿入バスキュラーアクセスカテーテルへの使用例)

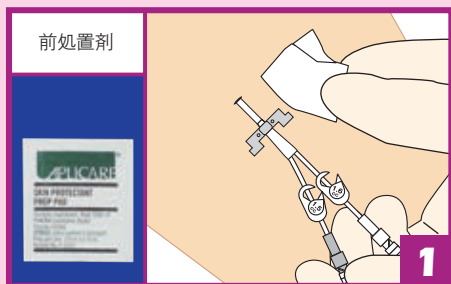


- 1** 院内のプロトコル及び手順に従って、アルコール綿等により固定する部位を清拭した後、前処置剤を塗布し、完全に乾燥させます。(通常10~15秒間)
*前処置剤の使用により皮膜をつくることで皮膚を保護します。

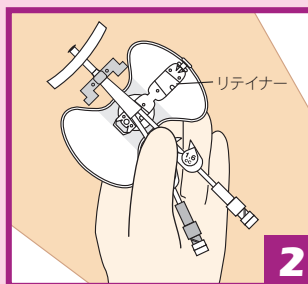


- 2** 必要に応じて付属の滅菌テープを用いてカテーテルを固定しておきます。リテイナーに表示された矢印が皮膚刺入部に向くようにカテーテルと体表の間に位置させ、リテイナーのスペースにカテーテルの分岐部をはめ込んで密着させます。

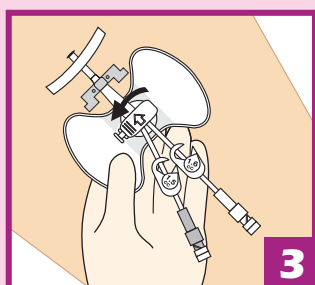

- 3** パッド及びカテーテルを支えながら、リテイナーのカバーをカチッと音がするまで確実に閉めて固定します。
*カテーテルにリテイナーを取り付けるまでは、パッドの裏紙を剥がして皮膚に貼り付けしないでください。

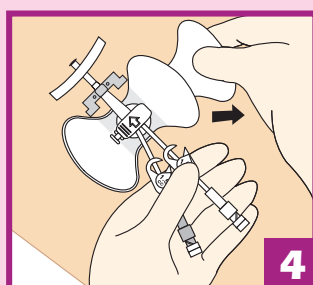


- 4** パッドの裏紙を片側からゆっくりと剥がして、パッドを皮膚に貼り付けます。

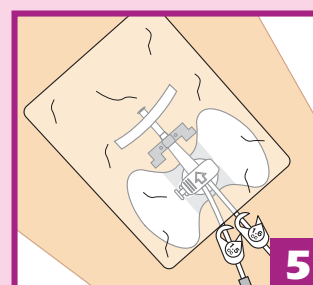


- 5** 貼り付けが終了した後、院内のプロトコル及び手順に従って、透明ドレッシング材等を貼り付けて、カテーテルの皮膚刺入部及び本品を保護します。


取り外し手順

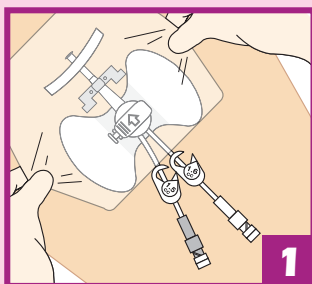


- 1** ドレッシング材等を注意深く剥がし、必要に応じてテープでカテーテルの刺入部付近を仮留めしておきます。

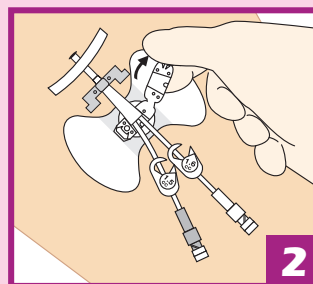

- 2** リテイナーのカバーの両側を指で挟み、突起を押し込みながら持ち上げて開けます。

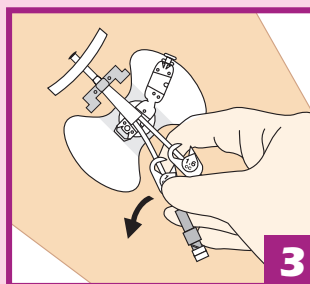

- 3** カテーテルをリテイナーから取り外します。

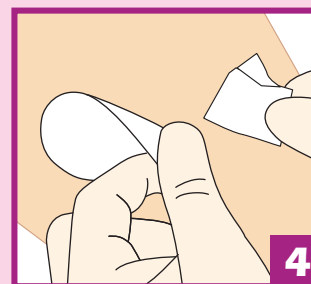

- 4** アルコール綿等でパッドの端を浸潤させて持ち上げ、その後さらに粘着面を浸潤させながらゆっくりと剥がしていきます。

ご使用にあたっての注意

スタットロックの使用中は、固定状態を毎日観察し、パッドの剥がれ、破損、汚損等の異常が認められる場合、あるいは医師、看護師等の医療従事者が必要と判断する場合には本品を新しいものに交換してください。また、少なくとも7日毎に本品を新しいものに交換してください。

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※Bard、バード、StatLock、スタットロックは、C. R. Bard社の登録商標です。

販売名：スタットロック
届出番号：27B1X00052000007
クラス分類：[1]一般医療機器
一般的名称：カテーテル固定用パッチ

セット内容

