




ご不安があれば

乳腺針生検について、不安に思うことや、疑問がありましたらどのようなことでもスタッフにお尋ねください。あなたが安心して検査を受けられるよう、わたくしたちがサポートします。

監修

北九州市立医療センター 乳腺甲状腺外科
(一財)西日本産業衛生会 北九州健診診療所

阿南 敬生 先生
小野 稔 先生

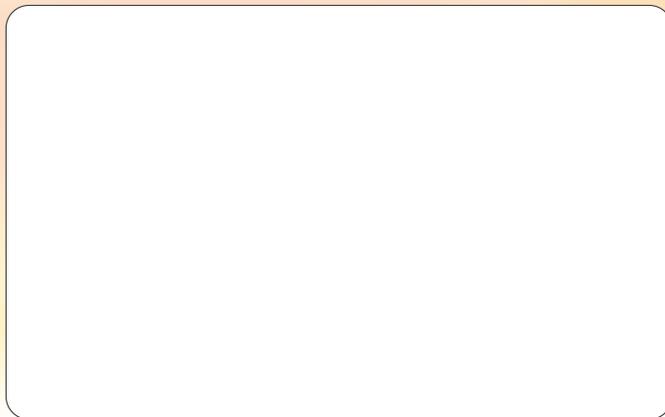

乳腺針生検を受けられる皆様へ



当院では、自動式生検針を使った 針生検を行っています

簡便な検査で、より確実な診断が可能です。
針生検は、体への負担が少なく、
短時間で行える精度の高い乳腺生検方法です。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

crbard.jp

BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
© 2019 BD. All rights reserved.

2019.9.000 L0280





乳腺針生検とは

生検とは乳腺の一部を採取して顕微鏡で直接詳しく診る検査です。

乳腺病理診断(顕微鏡診断)には、細胞を診る細胞診と組織を診る組織診があります。組織診は細胞診と比べてより確実な診断が可能です。組織診には、針生検、吸引式組織診、外科的に切開し切除する方法等がありますが、針生検は比較的細い針(直径約2mm)で組織を直接採取しますので、体への負担が少なく、短時間で終わる検査です。皮ふの傷後もほとんど目立ちません。

顕微鏡で診やすい材料を採取するためには、組織が壊れないように素早くきれいに切り取る必要があります。当院ではそのために、自動式生検針を使用しています。


自動式針生検の手順

1

超音波画像で、診断に最も適した目標を決めます。皮ふを消毒した後、局所麻酔します。

2

メスで2~3mmほど皮ふを切開します。
(麻酔が効いているので、ほとんど痛みはありません)

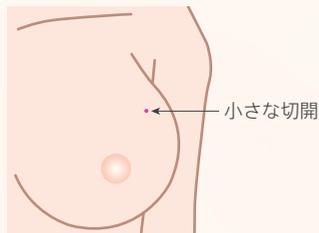

3

超音波画像を見ながら、生検針を目標へ誘導します。



4

組織が壊れないように自動的にバネの力で切り取ります。“バシッ”という音と、軽い振動を感じますが痛みはほとんどありません。複数の組織を採取する必要がありますので、同じ手順を数回繰り返します。

5

針を抜いたあと、5~10分間手で押さえて止血します。

6

傷口にばんそう膏を貼って検査は終了です。
(傷口は小さいので縫合はしません)
検査は止血の時間を含めて、約10~15分で終わります。



よくある質問

Q 傷跡は残りますか？

A 傷口は2~3mmほどですので、ほとんど残りません。

Q 検査は痛いですか？

A 局所麻酔をするので、痛みはほとんどありません。

Q 検査後の注意点はありますか？

A 検査当日は激しい運動を控えてください。日常生活は通常どおり可能です。シャワー、かかり湯も可能です。検査後の出血はほとんどありません。内出血で皮ふが青くなることがありますが、痛みが持続することはほとんどありません。詳しくはスタッフにお尋ねください。

Q 検査の結果はいつ分かりますか？

A 施設によって異なりますが、病理組織診断に1週間ほどかかります。