




組織生検針 総合カタログ

Core Needle Biopsy
Vacuum Assisted Biopsy

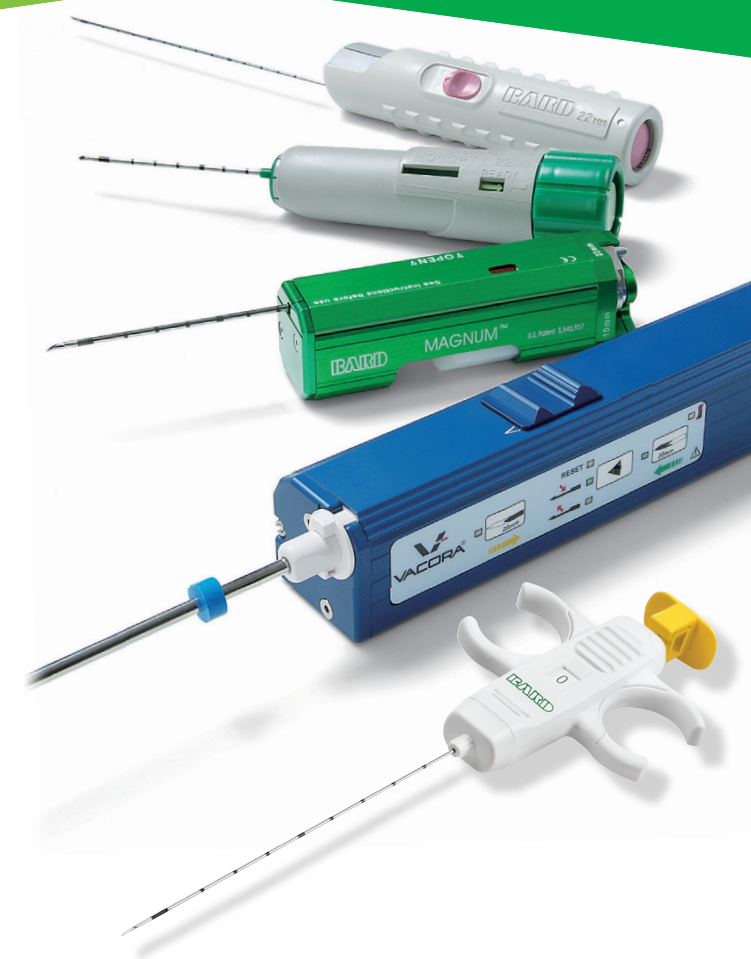

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

crbard.jp




BD, the BD Logo and Bard, MISSION, MONOPTY, Tru Guide, VACORA are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2019 BD. All rights reserved.

2019.9.9.000_UCC_C0288

組織生検針

Core Needle Biopsy
Vacuum Assisted Biopsy

メディコンは組織生検を
トータルにサポートします。

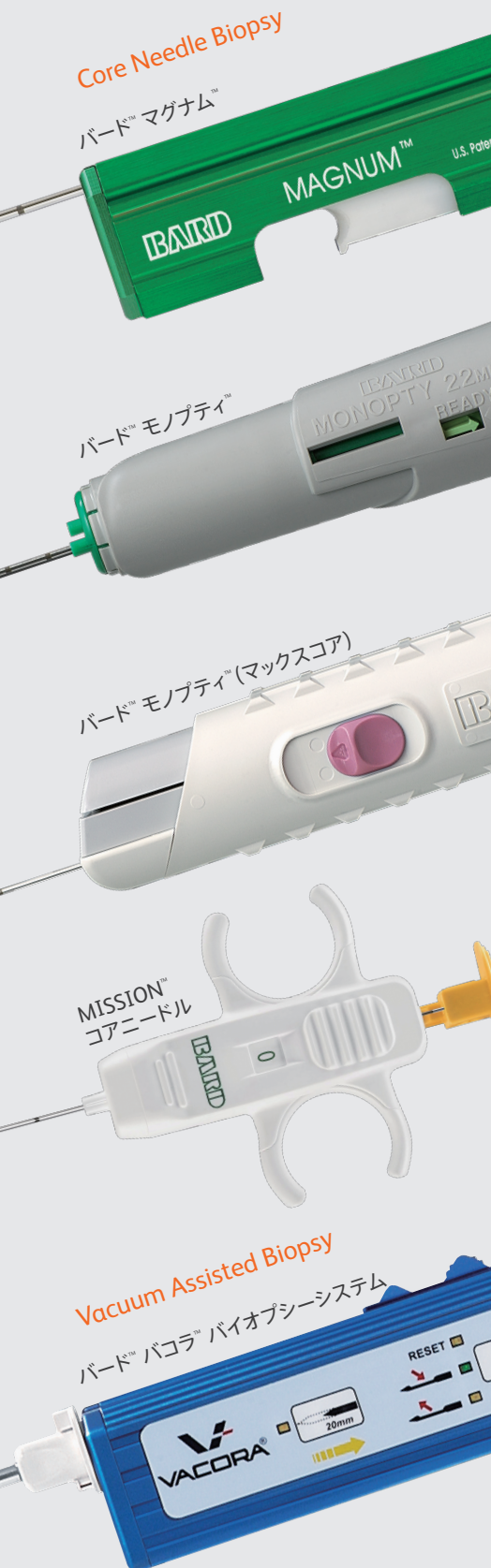

Core Needle Biopsy

リユーズブル自動生検装置

バード™ マグナム™



良質な組織採取を




片手で操作可能

操作方法はシンプルです。
白いスライドコックを2回引くことにより
片手で生検の準備が可能です。
また、組織採取後はスライドコックを
1回引くことで組織を取り出せます。



内蔵スプリング

内蔵スプリングが、高速での発射を
実現しました。

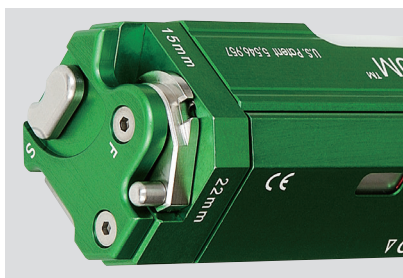


可変式ストローク


22mmと15mmの2種類のストローク
(進入深度)を症例に応じて選択する
ことが可能です。

ディスポーザブル組織生検針

バード™ マグナム™ ニードル

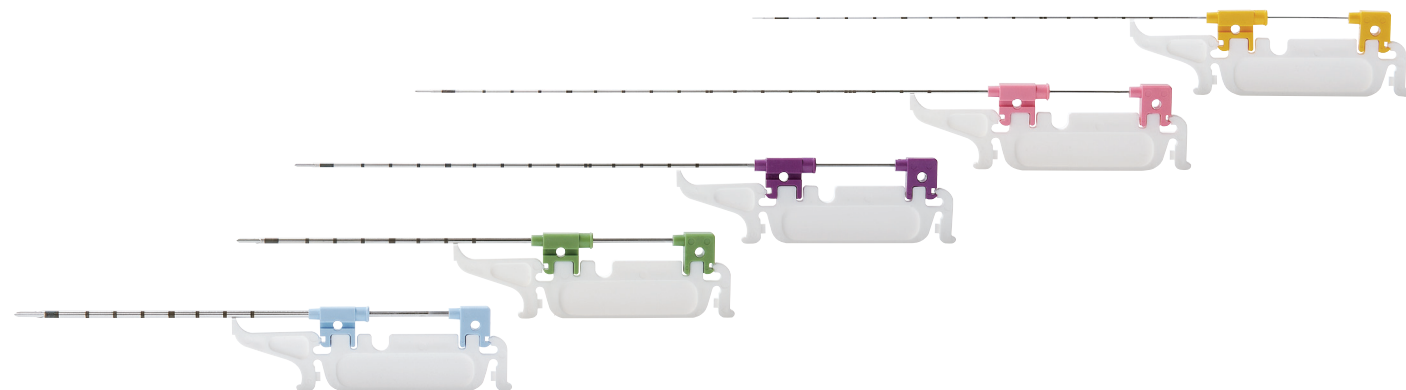


幅広いサイズラインナップで、多様なニーズに対応

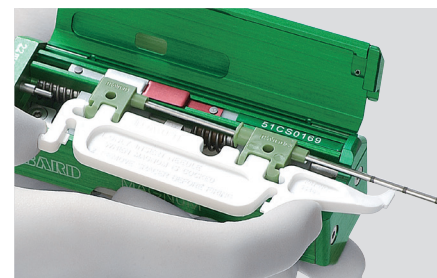

CTスペーサ

CTスペーサにより、本体への着脱が容易になります。
CTスペーサは軽量で、CTガイド下でのニードルの位置決めも容易です。
本体から取り外す際には、両端を内側へ強く
つまんでください。

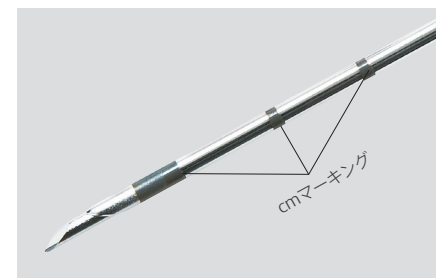

先端部の視認性

刺入深度の目安として、1cm毎のマーキングと
5cm毎の太いマーキングを表示しています。

ORDERING INFORMATION

販売名：バードマグナム

カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
MG1522	ストローク長可変式	22mm／15mm	1入

届 出 番 号：27B1X00052000401
クラス分類：[1] 一般医療機器
一般的名称：生検用穿刺器具


販売名：バードマグナム ニードル

カタログ番号	規 格	包 装	カタログ番号	規 格	包 装	カタログ番号	規 格	包 装
● MN1210	12G×100mm	10入	● MN1616	16G×160mm	10入	● MN1830	18G×300mm	10入
● MN1213※	12G×130mm		● MN1620	16G×200mm		● MN2010	20G×100mm	
● MN1410	14G×100mm		● MN1810	18G×100mm		● MN2016	20G×160mm	
● MN1416	14G×160mm		● MN1816	18G×160mm		● MN2020	20G×200mm	
● MN1420	14G×200mm		● MN1820	18G×200mm		承認 番 号 : 20900BZY00186000 クラス分類 : [2] 管理医療機器 一般の名称 : 単回使用組織生検用針		
● MN1610	16G×100mm		● MN1825	18G×250mm				

※印は特注品です。

ディスポーザブル自動生検針

バード™ モノプティ™

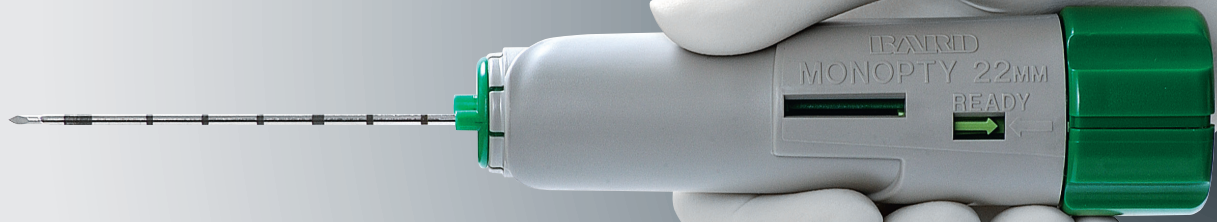

回転式の容易なセッティング




軽量ディスポーザブル

ディスポーザブルタイプの自動生検針です。ストローク(進入深度)は、ロング(22mm)とショート(11mm)の2種類があります。針のゲージサイズは、作動ボタンの色で確認できます。幅広いサイズラインナップで、多様な症例に対応します。



容易なセッティング

グリップの回転は力をあまりかけずスムーズに行え、容易に生検の準備ができます。

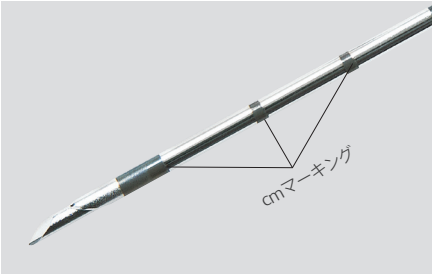

先端部の視認性

刺入深度の目安として、1cm毎のマーキングと5cm毎の太いマーキングを表示しています。

ORDERING INFORMATION

販売名：バード モノプティ[ボディ色:グレー]

カタログ番号	規格	仕様	包装	カタログ番号	規格	仕様	包装
●121410	14G×100mm	ストローク長22mm	10入	●121816	18G×160mm	ストローク長22mm	10入
●121416	14G×160mm			●121820	18G×200mm		
●121610	16G×100mm			●122010	20G×100mm		
●121616	16G×160mm			●122016	20G×160mm		
●121620	16G×200mm			●122020	20G×200mm		
●121810	18G×100mm						

販売名：バード モノプティ[ボディ色:白]


カタログ番号	規格	仕様	包装	カタログ番号	規格	仕様	包装
●211410	14G× 90mm	ストローク長11mm	10入	●211816	18G×150mm	ストローク長11mm	10入
●211416※	14G×150mm			●211820	18G×190mm		
●211610	16G× 90mm			●212010	20G× 90mm		
●211616	16G×150mm			●212016	20G×150mm		
●211620※	16G×190mm			●212020	20G×190mm		
●211810	18G× 90mm						

※印は特注品です。

承認番号：20200BZY00725000
クラス分類：[2]管理医療機器
一般名称：単回使用組織生検用針

ディスポーザブル自動生検針

バード™ モノプティ™ (マックスコア)

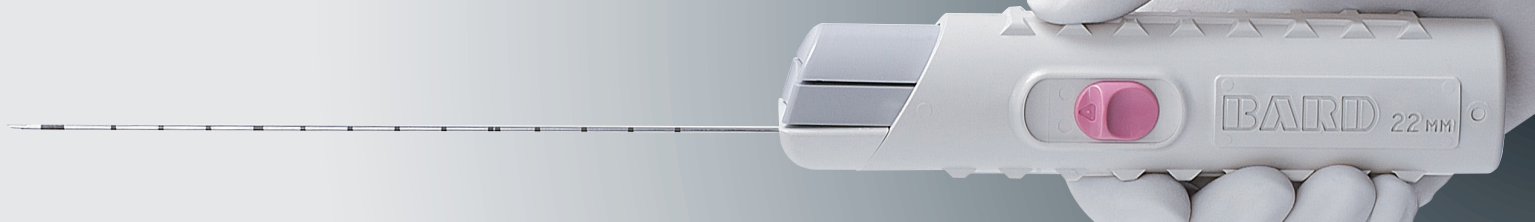


人間工学デザインに基づく高い操作性を実現




操作性を考慮したディスポーザブル

ディスポーザブルタイプの自動生検針です。ストローク(進入深度)は、22mmです。本体は、軽量で持ちやすく、滑りにくいデザインになっています。

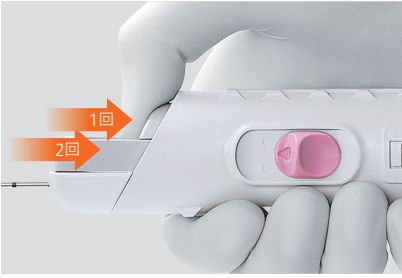


片手操作可能

片手で上部、下部スライドを順に引くことにより、片手で生検の準備ができます。

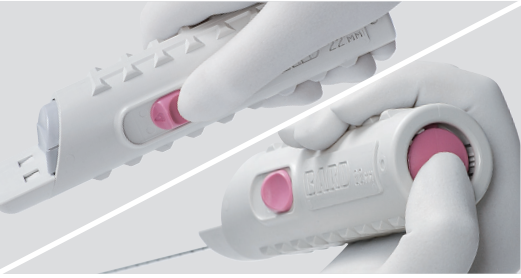

2ヶ所の作動ボタン

作動ボタンが2ヶ所(側方と後方)にあり、持ち方によりどちらのボタンでも作動できます。作動ボタンの色で針のゲージサイズが確認できます。

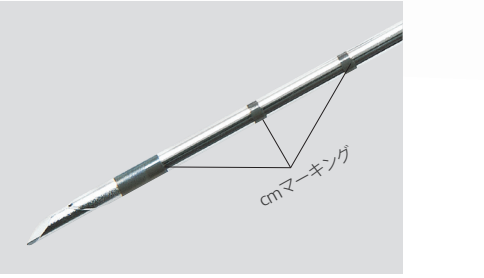

先端部の視認性

刺入深度の目安として、1cm毎のマーキングと5cm毎の太いマーキングを表示しています。

ORDERING INFORMATION

販売名：バード モノプティ(マックスコア)

カタログ番号	規格	仕様	包装	カタログ番号	規格	仕様	包装
●MC1410	14G×100mm	ストローク長22mm	5入	●MC1820	18G×200mm	ストローク長22mm	5入
●MC1416	14G×160mm			●MC1825	18G×250mm		
●MC1610	16G×100mm			●MC2010	20G×100mm		
●MC1616	16G×160mm			●MC2016	20G×160mm		
●MC1810	18G×100mm			●MC2020	20G×200mm		
●MC1816	18G×160mm						

承認番号：20200BZY00725000
クラス分類：[2]管理医療機器
一般名称：単回使用組織生検用針

ディスポーザブル生検針

MISSION™ コアニードル




軽量セミオートマチック式生検針

セキュリティ

- 症例に応じて進入深度の切り替えができます(10mm/20mm)。
- ペネトレーションデプスインジケータにより、選択した進入深度の再確認が可能です。
- FIREインジケータにより、FIRE手前の位置を目視で確認できます。
- プラントチップスタイレットを用いることで穿孔リスクの低減が期待できます。



ペネトレーションデプスインジケータ (例) 10mm

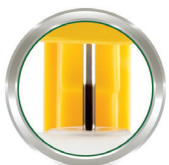


FIREインジケータ



プラントチップ
スタイレット

超音波ガイド下生検

- スタイレットとカニューラの先端には、超音波下での視認性を確保するため、超音波エンハンスメント加工が施されています。

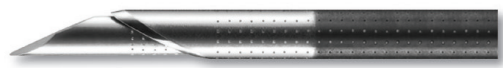


ORDERING INFORMATION

販売名：MISSION コアニードル

カタログ番号(単品)	規 格	包装	別売: TruGuide コアキシャルニードル カタログ番号(規格)
● 1410MS	14G×100mm	5入	C1410A(13G× 78mm)
● 1416MS	14G×160mm		C1416A(13G×138mm) ※
● 1610MS	16G×100mm		C1610A(15G× 78mm)
● 1616MS	16G×160mm		C1616A(15G×138mm)
● 1810MS	18G×100mm		C1810A(17G× 78mm) ※
● 1816MS	18G×160mm		C1816A(17G×138mm)
● 1820MS	18G×200mm		C1820A(17G×178mm) ※
● 1825MS ※	18G×250mm		
● 2010MS	20G×100mm		C2010A(19G× 78mm) ※
● 2016MS	20G×160mm		C2016A(19G×138mm) ※
● 2020MS	20G×200mm		C2020A(19G×178mm) ※

コアキシャルニードル

- 18/20Gのキット品には、コアキシャルニードル(①)が同梱されています。
(18G×250mmのタイプは単品のみになります。)
- プラントチップスタイレット(②) デプスストップ(③) アダプタ(④)が同梱されています。
- コアキシャルニードルと併用する際、アダプタを用いることで針先端位置を調整することができます。

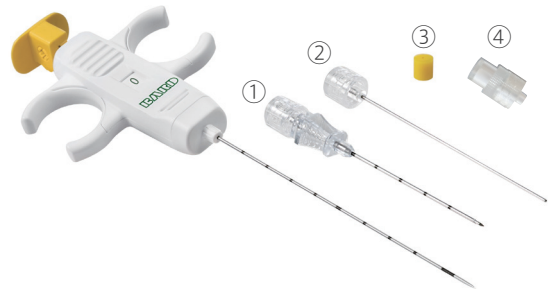

CTガイド下生検

- 軽量設計によりCTガイド下生検に適しています。
- 人間工学的デザインにより、さまざまな握り方に対応します。



カタログ番号(単品)	規 格	同梱品の規格 TruGuide コアキシャルニードル	包装
● 1810MSK	18G×100mm	17G× 78mm	5入
● 1816MSK	18G×160mm	17G×138mm	
● 1820MSK	18G×200mm	17G×178mm	
● 2010MSK	20G×100mm	19G× 78mm	
● 2016MSK	20G×160mm	19G×138mm	
● 2020MSK	20G×200mm	19G×178mm	

※印は特注品です。

販 売 名：MISSION コアニードル
認 証 番 号：227ADBZX00049000
クラス分類：[2] 指定管理医療機器
一般的名称：単回使用組織生検用針

販 売 名：TruGuide コアキシャルニードル
認 証 番 号：225ADBZX00149000
クラス分類：[2] 指定管理医療機器
一般的名称：導入針

吸引式乳房組織生検システム

バード™ バコラ™ バイオプシーシステム



3つのモダリティに対応

組織採取に必要な要素をコンパクトな本体に内蔵

内蔵型吸引システム

吸引装置が本体の中にコンパクトに内蔵されています。

10Gと14Gの2サイズ

長さ調節可能なサンプルチャンバ

ディスタンスリングを使用することにより、20mmのサンプルチャンバを10mmに調節することができます。

パワーサプライ

電源用コードが不要な
充電式リチウムイオン電池。

サムホイール

回転させることで組織採取する
角度を360度12方向で選択できます。

ORDERING INFORMATION

販売名：バード バコラ バイオプシーシステム

カタログ番号	仕 様	包 装
VF2019	ドライバー	1入

カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
VB10118	バイオブシーブローブ	10G×118mm	5入
※ VB10140		10G×140mm	
VB14116		14G×116mm	
※ VB14138		14G×138mm	
VB10118US	バイオブシーブローブ 超音波用バイオブシーブローブ	10G×118mm	
※ VB10140US		10G×140mm	
VB14116US		14G×116mm	
※ VB14138US		14G×138mm	

カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
VC10118	コアキシャルカニューラ	10G×118mm	5入
※ VC10140		10G×140mm	
VC14116		14G×116mm	
※ VC14138		14G×138mm	
※ VC10118P		10G×118mm	
※ VC10140P		10G×140mm	
※ VC14116P		14G×116mm	
※ VC14138P		14G×138mm	
※ VC10118MRS		10G×118mm	
※ VC10140MRS		10G×140mm	
※ VC14116MRS	コアキシャルカニューラ MRI用	14G×116mm	
※ VC14138MRS		14G×138mm	

カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
※ VA1LO	アダプター LORAD用		1入
※ VA1MA	アダプター MAMMOTEST用		
※ VA1SI	アダプター SIEMENS用		1組(2本)入
※ VA1MRSI	アダプター SIEMENS MRI用		1入
カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
※ VBB27CY	ニードルガイド CYTOGUIDE用	2.7mm	5組入 (1組2入)
※ VBB40CY		4.0mm	
※ VBB45CY		4.5mm	
※ VBB27GE	ニードルガイド GE用	2.7mm	5組入 (1組2入)
※ VBB40GE		4.0mm	
※ VBB45GE		4.5mm	
※ VBB27LO	ニードルガイド LORAD用	2.7mm	5入
※ VBB40LO		4.0mm	
※ VBB45LO		4.5mm	
※ VBB27MA	ニードルガイド MAMMOTEST用	2.7mm	5入
※ VBB40MA		4.0mm	
※ VBB45MA		4.5mm	
※ VBB27SI	ニードルガイド SIEMENS用	2.7mm	5組入 (1組2入)
※ VBB40SI		4.0mm	
※ VBB45SI		4.5mm	
カタログ番号	仕 様	規 格	包 装
VBD1010	ディスタンスリング	10G×10mm	1入
※ VBD1410		14G×10mm	

※印は特注品です。

認 証 番 号：221ADBZX00110000
クラス分類：[2] 管理医療機器
一般的名称：吸引式組織生検用キット